



Silla infantil VELA con POWERWHEELS



Vea la silla en uso:

vela.my/niño



Powerwheels apoya al niño en:

Ser independiente en casa y en la escuela

✓ Ahorrar energía y aumentar su participación

✓ Mantenerse activo durante períodos más largos

✓ todos los días

La VELA Tango 600ES con Powerwheels ofrece todos los beneficios de una silla para niños VELA más la capacidad de moverse de forma independiente. La silla está diseñada para niños y jóvenes con necesidades especiales para ayudarlos a participar en clase, socializar con amigos y mejorar sus habilidades de aprendizaje. Cuando el niño quiere moverse de forma independiente, todo lo que tiene que hacer es encender la función Powerwheels y la silla se puede propulsar eléctricamente.

Lograr una movilidad independiente: Si el niño carece de energía o si no tiene la capacidad de levantarse, mover su silla y sentarse varias veces al día, es posible ahorrar energía utilizando la Vela Tango 600E con Powerwheels. Esto permite que el niño concentre toda su energía en la actividad.

Mejorar la calidad de vida del niño: Mayor movilidad para moverse en casa o en la escuela sin depender de otros, mejora la autoestima y la calidad de vida del niño. Los controles son fáciles de usar y el bajo consumo y velocidad lo hacen adecuado para niños.

Nuestro probado sistema de asientos facilita la concentración y por ejemplo, asistir a las clases. Los apoyabrazos y el freno en las ruedas ayudan a concentrarse en una tarea específica al mismo tiempo que brindan seguridad y crean una sensación de protección.

El VELA Tango 600ES con PowerWheels ofrece todas las ventajas de VELA: El niño puede cambiar la altura de su asiento de forma independiente para una actividad específica. El uso del ajuste eléctrico de altura para colocar el asiento en la posición más baja hace que sea más fácil para el niño levantarse y sentarse en la silla.

VENTAJAS

- :: La base estable y el freno en las ruedas proporcionan seguridad y apoyo durante las actividades.
- :: La silla “crece” con el niño, ya que el asiento y el respaldo se pueden cambiar posteriormente según las necesidades. Diferentes tamaños de asiento y respaldo
- :: disponibles. Un ajuste de altura eléctrico fácil de usar ayuda al niño a sentarse y levantarse de la silla y garantiza una altura óptima del asiento durante las actividades.
- :: El niño puede utilizar la silla según sea necesario para mantenerse activo durante el día y ganar energía.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



VELA Tango 600ES con Powerwheels

MEDIDAS Y PESO

Ajuste de altura	Eléctrico: movimiento de 200 mm o 300 mm
Altura del asiento (medida desde el borde inferior del asiento) Dependiendo del tipo de asiento, se debe añadir la siguiente altura: Asiento E: +6,0 cm Todas las alturas de los asientos se miden sin carga de peso	rango 200 mm: 34,5-54,5, 36,5-56,5 cm, 38,5-58,5 , 40,5-60,5 cm, rango 300 mm: 39-69 cm, 41-71 cm, 43-73 cm, 45-75 cm, 47-77 cm
Asiento: ancho x profundidad	32 x 35 cm (Asiento E2) 36 x 43 cm (Asiento E3) 40 x 47 cm (Asiento E4)
Inclinación del asiento	6° hacia adelante, 9° hacia atrás
Profundidad del asiento	30-35 cm (Asiento E2) 35-43 cm (Asiento E3) 39-47 cm (Asiento E4-Sitz)
Respaldo: ancho x alto	26 x 26 cm (Respaldo E2) 28 x 35 cm (Respaldo E3)
Inclinación del respaldo	12° hacia adelante, 15° hacia atrás
Ajuste de la altura del respaldo	0-11 cm (respaldo E3)
Apoyabrazos (acolchado de PU), ancho x largo	8 x 26 centímetros
Apoyabrazos, altura ajustable	0-19 centímetros
Distancia entre los apoyabrazos, ajustable	26-35 cm (Asiento E2) 31-40 cm (Asiento E3) 34-40 cm (Asiento E4)
Posición del reposabrazos en relación al asiento	17 cm (8,5 cm hacia adelante, 8,5 cm hacia atrás) (Asiento E3)
Rotación del asiento	No
Reposapiés (Tipo-S), ajustable	21-31 cm, 26-41 cm
Freno	Manual
Velocidad Powerwheels	0-4 km/h. Se puede ajustar mediante el joystick
Medida bastidor	55 x 55 centímetros
Peso de la silla	38 kilos
Carga máxima	80 kilos
Peso recomendado del usuario	15-50 kilogramos
Seguridad con respecto a elevación y Power Wheels	El sistema Powerwheels se desacopla si la altura del asiento aumenta más de 10 cm
Función PowerWheels	Las ruedas deben estar desplegadas tocando el suelo para garantizar la tracción del Powerwheels
Carga	Cargar diariamente
N.º de artículo.	61013 + 929449 (Seleccione la posición del joystick en el lado derecho o izquierdo de la silla)

*Las dimensiones estándar están marcadas en negrita.

Nota: La función Powerwheels no reemplaza a una silla de ruedas eléctrica, sino que es una función de asistencia para mover la silla. Una regla general es que la silla debe cargarse durante el día si se utilizan las ruedas motrices con más frecuencia que los pies para moverse.

TAPICERÍA Y ACCESORIOS

La tapicería estándar del VELA Tango 600ES es una tela Mionetta negra, que tiene buena durabilidad y es repelente al agua.

Las sillas se pueden pedir con una amplia gama de accesorios y soluciones eléctricas para adaptarse a las necesidades a las necesidades del niño, como diferentes tapicerías, soportes de cuerpo o ajustes eléctricos.

ALTA CALIDAD - HECHO EN DINAMARCA

En VELA fabricamos productos de calidad para personas sedentarias desde 1935. Nuestro objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que utilizan nuestros productos.

Nuestras sillas están sometidas a un intenso desgaste diario.

colocar. Por eso en VELA utilizamos mecanismos robustos, unas piezas y cubrimos las sillas con materiales especialmente duraderos para mantenerlas limpias y funcionales durante muchos años.

Todas las sillas VELA están certificadas según las normativas de productos sanitarios.

Marcado CE según el Reglamento de Producto 2017/745. También estamos certificados según ISO9001 e ISO14001, entre otros.

Normas reconocidas a nivel nacional en materia de calidad y medio ambiente.