




## Instalación del sistema Turn All® en la cama

# 1

Retire el colchón de la cama (Figura 1).

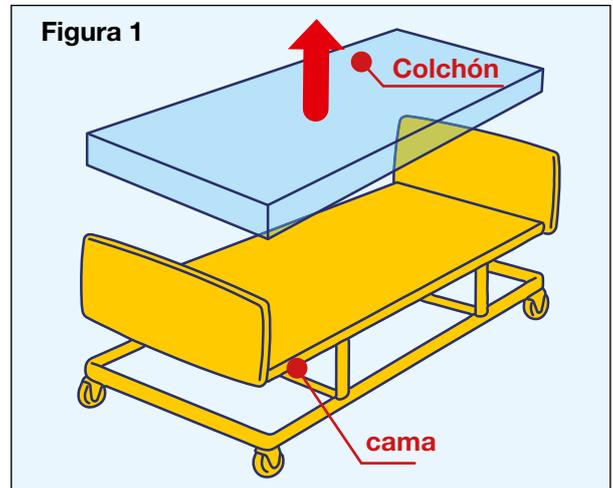


# 2

Coloque el sistema Turn All® (A) en el somier.

Oriente el sistema de manera que la conexión de la manguera (B) esté en el extremo de los pies de la cama (Figura 2).


Fije el sistema Turn All® al somier utilizando las correas (C) de la cubierta (Figura 2).

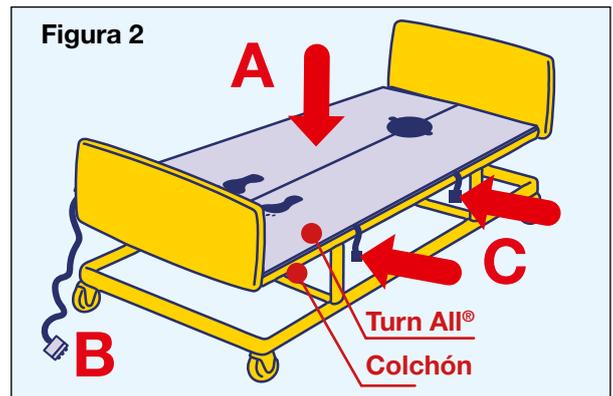

# 3


3 Vuelva a colocar el colchón en la cama sobre el sistema Turn All®. (Figura 3).

La bomba Turn All® (D) se coloca en el extremo de la cama utilizando los dos tirantes de la parte posterior de la bomba (Figura 3).

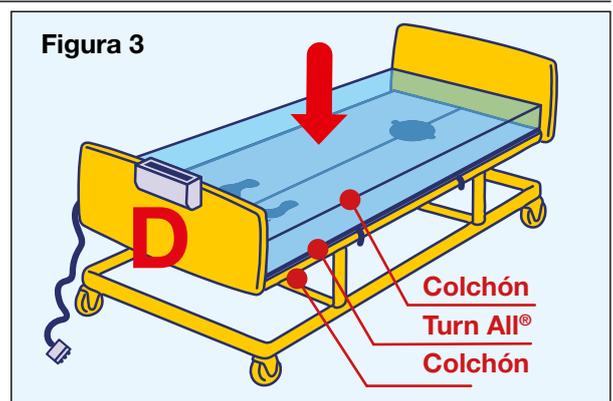

# 4

Introduzca la conexión de la manguera (B) en la bomba (D) (Figura 4).

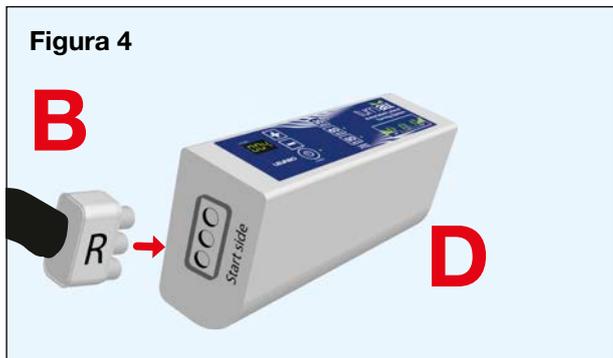



Para más información, lea la guía del usuario

## Puesta en marcha y ajuste del sistema Turn All®

# 1

Conecte el cable de alimentación a la bomba (Figura 1)  
Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.

Figura 1




# 2

Encienda la bomba con el botón "POWER" (D) (Figura 2).

Ajuste el temporizador "G" con los botones "+" y "-".

El número del temporizador "G" indica cuántas horas debe funcionar el sistema automáticamente.

Figura 2

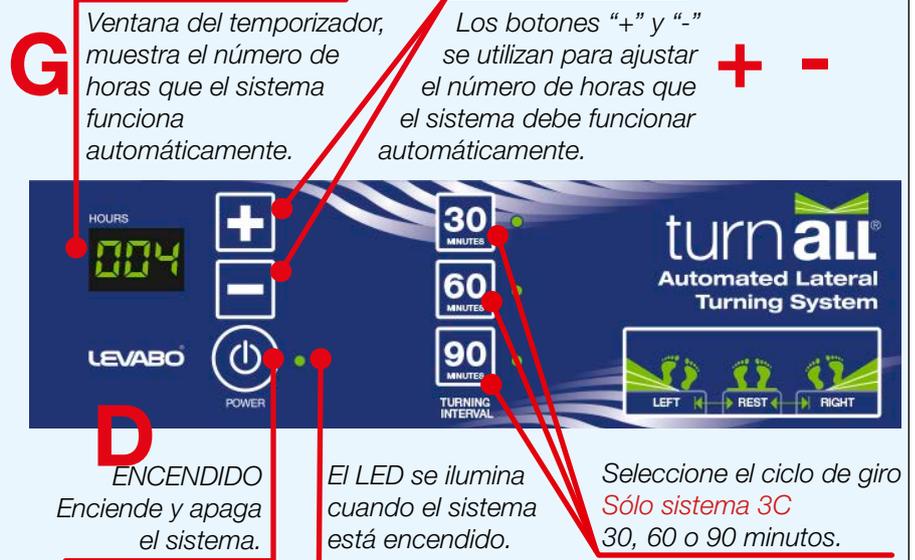

# 3

3 El sistema Turn All® funciona ahora automáticamente. Un lado del colchón se levanta ahora durante 30/60/90 minutos (Sistema 1C 90 minutos), luego se acuesta en posición horizontal durante 5 minutos durante la transición, luego el otro lado se levanta durante 30/60/90 minutos (Sistema 1C 90 minutos), luego se acuesta en posición horizontal durante 5 minutos durante la transición.

Esta secuencia se repite durante el número de horas ajustado en el temporizador "G", y luego se vuelve a colocar en posición horizontal. Véase la ilustración de la página 5 de la guía del usuario.

Figura 3


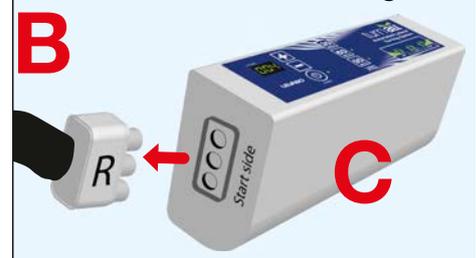


Figura 4



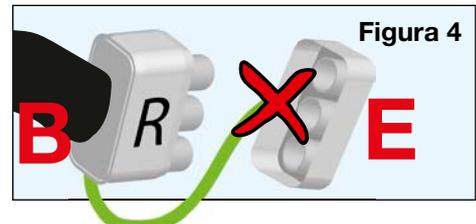


### Uso del sistema Turn All® para la elevación estática


# 1

1 Si el sistema Turn All® se va a utilizar para una elevación estática como cojín inclinado, la conexión de la manguera se invierte según el lado que se vaya a elevar.

La conexión de la manguera (B) está marcada con las letras “R” para la derecha y “L” para la izquierda.

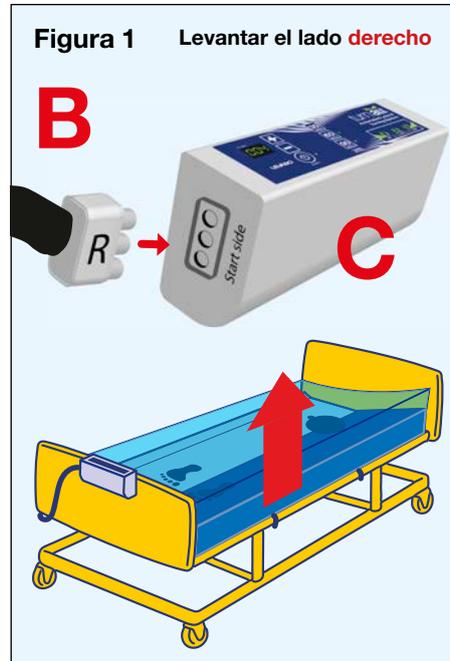

Si el ascensor debe comenzar en el lado derecho de la cama, visto desde el extremo de los pies, la conexión de la manguera con la letra “R” se gira hacia el texto “Lado de inicio” en la bomba, como se muestra en (Figura 1).


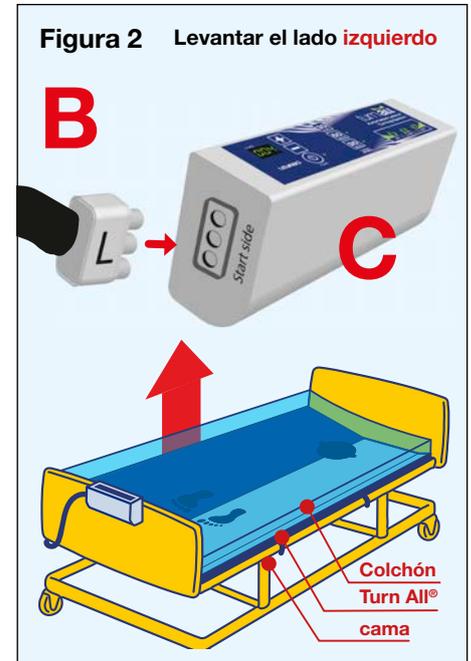


Si el ascensor debe comenzar en el lado izquierdo de la cama, visto desde el extremo de los pies, la conexión de la manguera con la letra “L” se gira hacia el texto “Lado de inicio” en la bomba, como se muestra en (Figura 2).

# 2

La bomba se pone en marcha y bombea hasta alcanzar la altura de elevación deseada. (Figura 3).

A continuación, se desconecta la conexión de la manguera (B) de la bomba (C) (Figura 4), y se apaga la bomba.

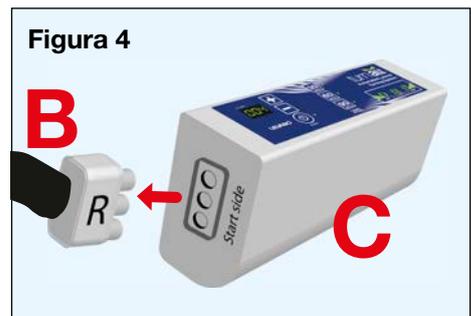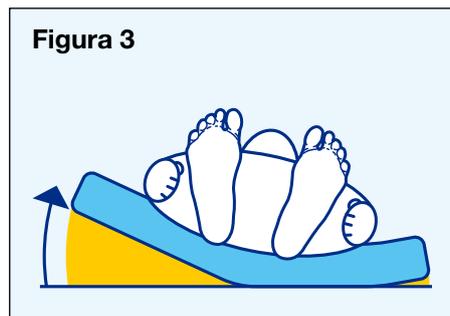


# 3

A continuación, desconecte la conexión de la manguera (B) de la bomba (C) (Figura 4).

La conexión de la manguera (B) se cierra ahora con la tapa (E) (figura 5).

El sistema Turn All® permanecerá ahora en esta posición hasta que se vuelva a retirar la tapa (E) y, de este modo, se elimine automáticamente el aire del sistema.

Compruebe que las cámaras de aire están completamente vacías antes de volver a conectar la conexión de la manguera (B) a la bomba (C).

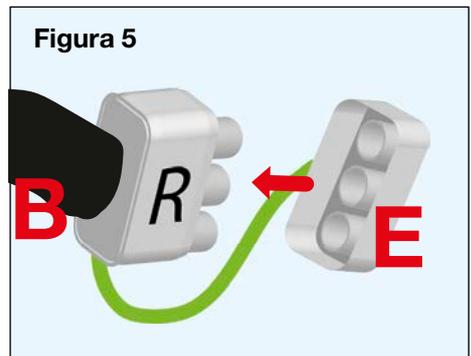

### Retirada del colchón interior

Para más información,  
lea la guía del usuario



# 1

Si el sistema Turn All® necesita ser limpiado, puede sacar el colchón interior (H) figura 1, abrir la cremallera de la tapa (J) figura 1 y retirar la parte superior.

# 2

Abra la cremallera (L) figura 1 y tire de los tubos de conexión (B) figura 1-2) a través de la abertura hacia la parte inferior de la cubierta.

# 3

Abra las 6 tapas (K) de la figura 3.

# 4

El colchón interior (H), figura 4, puede retirarse ahora. El colchón nuevo o limpio se monta como se muestra en el orden inverso.

#### Turn All® Cover (la funda exterior azul)

El colchón elevador interno debe retirarse de la Turn All® Cover antes de lavar la funda.

Turn All® Cover puede lavarse en la lavadora a 95° C. y en la secadora a baja temperatura.



Turn All® Cover se puede lavar en autoclave v. Max. 121° C.

El colchón interior Turn All® Multi Patient puede limpiarse con agua tibia y jabón. La desinfección puede realizarse con una solución apropiada a base de cloro al 1%".

