



Alert-iT Pager

Manual de usuario

Este documento se aplica a;

Modelo: **P201 (Receptor de 4 y 128 canales) Producto No Sanitario**

Versión del producto: **v1 y v2**

Firmware: **v1.1.***

Alert-iT y el logotipo de Alert-iT son marcas registradas o marcas de iTs Designs Ltd.

Copyright @ 2025 iTs Designs Ltd.

Todos los derechos reservados.

Manual de usuario del receptor UH1519-ENG P201. Versión: 1.1.0 [16 sep 2025]

Índice

Alert-iT Pager.....		1	receptores 128 canales).....	13	
1	INTRODUCCIÓN	3	8	CONFIGURACIONES RECOMENDADAS.....	14
1.1	Descripción del producto	3	8.1	Domicilio particular con sensor Único	14
1.2	Uso previsto	3	8.2	Centro de atención pequeño con múltiples sensores y un solo receptor	14
1.3	Indicaciones para su uso	3	8.3	Centro de atención media con múltiples sensores y varios receptores.....	14
1.4	Usuarios previstos y entorno de uso	3	•	Permitir que los cuidadores puedan hacer llamadas de ayuda (Solo disponible en el receptor de 128 canales): ..	15
1.5	Tipo de pacientes a la que se dirigía	3	9	EMPAREJAR SENSORES AL RECEPTOR.....	15
1.6	Contraindicaciones	3	9.1	Emparejamiento.....	15
1.7	Vida útil del dispositivo.....	4	9.2	Nombres y ubicaciones.....	15
2	SEGURIDAD.....	4	9.3	Emparejando un nuevo sensor.....	15
2.2	Definiciones de seguridad	4	9.4	Eliminar un sensor.....	16
2.3	Ajuste no intencionado de los ajustes	4	9.5	Desactivar un sensor.....	16
2.4	Radio de seguridad (no disponible en este dispositivo) 4		10	ESTADO DE LA BATERÍA Y VIDA ÚTIL	16
Nota importante:		4	Brillo		17
2.5	Responsabilidad por productos	5	Sonido teclas		17
2.6	Precauciones de seguridad.....	5	Ver información.....		17
2.7	Consulta con un profesional sanitario	6	Nombre receptor		17
2.8	Explicación de las marcas usadas en el dispositivo y en la documentación	7	Fecha y hora		17
3	CONTENIDO DEL PAQUETE	8	Modo estándar y no molestar		17
3.1	Productos compatibles	8	Silenciar aviso		17
4	RESUMEN DEL SISTEMA	8	Posponer fallos.....		17
4.1	Receptor Alert-iT Pager	8	Apagado automático pantalla		17
4.2	Luces de estado	8	Modo de visualización		17
4.3	Fallos de carga.....	9	Contraseña.....		18
4.4	Características del receptor	9	12	LIMPIEZA	18
4.5	Notificaciones de alarma	10	13	RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE	18
4.6	Reseteo de alarmas	10	14	ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO DESPUÉS DE SU USO 18	
4.7	Duración de las alarmas	10	15	DECLARACIONES DE CONFORMIDAD.....	19
4.8	Uso de modos "estándar" y "no molestar"	11	www.alert-it.co.uk/support/.....		19
5	CONFIGURACIÓN INICIAL	11	16	REVISIONES PERIÓDICAS.....	19
5.1	Uso del clip de cinturón y el cordón	11	16.1	Comprobaciones diarias	19
5.2	Carga	11	Nivel de batería.....		19
5.3	Pruebas de distancia.....	11	Modo normal / no molestar		19
6	FUNCIONES BÁSICAS.....	12	16.2	Comprobaciones semanales.....	19
6.1	Encendido del receptor	12	Activación de la alarma		19
6.2	Activar la pantalla	12	17	REACONDICIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO ANTES DE SU REUTILIZACIÓN	19
6.3	Apagado del receptor	12	18	ALERTA-IT DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 20	
6.4	Responder a notificaciones de alarma	12	19	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	22
7	FUNCIONES ADICIONALES	13	Unidad de control		22
7.1	Resetear alarmas desde sensores inaccesibles.....	13	Condiciones ambientales.....		22
7.2	Comunicaciones de receptor a receptor (Solo disponible en el receptor de 128 canales)	13			
7.3	Llamadas de asistencia (Solo disponible en 128				

1 INTRODUCCIÓN

Estas 'instrucciones de uso' describen el uso del "receptor" Alert-iT.

La(s) "**Versión(es) del producto(s)**" a las que se aplican estas instrucciones se muestran en la portada de este documento. Esto debe consultarse y compararse con el número de "**Versión del producto**" que aparece en la pegatina de información del producto que se encuentra en la parte superior de tu dispositivo. Si este documento no es adecuado para su producto, consulte la sección de 'soporte' de nuestra página web para instrucciones alternativas.

Siga todas las instrucciones proporcionadas en este documento sobre la configuración inicial, uso, limpieza y reciclado del dispositivo.

1.1 Descripción del producto

El "**receptor**" se utiliza para alertar a los cuidadores sobre notificaciones de alarmas y fallos provenientes de monitores y transmisores emparejados.

Este manual de usuario asume que el receptor ha sido configurado antes de su uso por un responsable o cuidador principal para alertar de las llamadas de todos los monitores de tu "residencia", "centro de día" u "hogar" y está configurado correctamente. Este manual ofrece detalles de una variedad de configuraciones estándar que pueden ser relevantes, así como características de control más generales accesibles para diferentes niveles de usuario.

Los cuidadores son notificados mediante alertas visuales, auditivas y de vibración. (si están activadas). El entorno operativo suele ser una residencia, centro de día u hogar.

PRECAUCIÓN: El receptor P201 no es un producto sanitario y está restringido el uso a dispositivos que sean "**Securelink**".

1.2 Uso previsto

El receptor Alert-iT está diseñado para ayudar en el cuidado de los pacientes notificando al cuidador para atender y verificar el bienestar del paciente.

1.3 Indicaciones para su uso

Este dispositivo está diseñado y fabricado como una ayuda social destinada únicamente a ser utilizada como ayuda para un cuidador.

Destinado a mejorar la vigilancia de los cuidadores ante los efectos secundarios angustiosos de diversas dolencias y necesidades individuales de cuidado. El sistema no monitoriza los procesos fisiológicos vitales y no se debe esperar que diagnostique ninguna enfermedad ni prediga el inicio de síntomas.

1.4 Usuarios previstos y entorno de uso

El producto está pensado para ser utilizado como ayuda para los cuidadores. El usuario puede ser una persona o un profesional sanitario. El producto está pensado para ser utilizado en diversos entornos, incluyendo atención domiciliaria y profesional.

1.5 Tipo de pacientes a la que se dirigía

El uso del producto no está restringido a ningún grupo específico de pacientes.

1.6 Contraindicaciones

No hay contraindicaciones.

1.7 Vida útil del dispositivo

La vida útil típica esperada del receptor es de **"5 años"**.

Sustituye el receptor si se observa algún daño en el dispositivo.

Consulta la página **"18"** para la guía sobre reciclaje. Si se observan grietas o daños estructurales, cesar el uso y sustituir el receptor inmediatamente.

2 SEGURIDAD

2.1 Información importante

Antes de usar el producto, se debe leer y comprender el contenido de este manual de usuario.

2.2 Definiciones de seguridad



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves si no se siguen las instrucciones.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daño al producto si no se siguen las instrucciones.



NOTA: Información necesaria en una situación dada.

2.3 Ajuste no intencionado de los ajustes

Cambiar el address (dirección única de los emisores) puede provocar una notificación de fallo de RF en el equipo receptor y cualquier notificación de alarma resultante puede dejar de recibirse.

2.4 Radio de seguridad (no disponible en este dispositivo)

Muchos de los monitores críticos de seguridad de Alert-iT tienen activada una función llamada **"Securelink"** o **"Failsafe"**.

En este modo, el monitor transmite una transmisión de radio normal para formar un 'latido' de seguridad que permite a cualquier equipo receptor notificar al cuidador si está fuera de alcance o si el dispositivo ha fallado por cualquier motivo.

Nota importante:

Este **"Receptor no es considerado un dispositivo médico P201"** y está restringido a su uso con dispositivos que no sean **"Securelink"**, lo que significa que el receptor no te avisa si el monitor o sensor está fuera del alcance del receptor.

2.5 Responsabilidad por productos

Este producto Alert-iT ha sido diseñado teniendo en cuenta la fiabilidad e integridad. Aunque ofrece un método de alerta muy fiable, siempre es posible que una condición de angustia pase desapercibida por diversas razones (incluyendo un mal funcionamiento) y, en situaciones de riesgo de vida, se recomienda utilizar el sistema Alert-iT junto con técnicas adicionales. Ni el fabricante ni su agente pueden aceptar la responsabilidad legal de proporcionar un sistema que es infalible.

El producto se desarrolla y evalúa riesgos según la norma ISO 14971. El manual y las especificaciones técnicas se elaboran según las evaluaciones de seguridad en el análisis de riesgos. Siempre hay que tener en cuenta la seguridad al usar el producto. Alert-iT no se hace responsable de ninguna consecuencia por el uso o la instalación incorrecta del producto. Cualquier daño o manipulación del producto invalida la garantía y exime de responsabilidad del fabricante. La vida útil estimada del producto se aplica cuando se utiliza de acuerdo con su uso previsto y las instrucciones de mantenimiento.

2.6 Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA:

- Si una fuerza externa rompe el cargador de corriente y las piezas permanecen en el enchufe, puede provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado y asegurado para evitar el riesgo de tropiezos, enredos o estrangulamientos.
- El cuidador nunca debe activar una alarma sin comprobar el estado del paciente.



ADVERTENCIA: Según la norma 60601-1-2 EMC

- Se debe evitar el uso de este equipo adyacente o apilado con otros equipos porque podría resultar en un funcionamiento inadecuado. Si es necesario este uso, este equipo y el otro equipo deben ser observados para verificar que funcionan con normalidad.
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría resultar en un aumento de las emisiones electromagnéticas o en una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y resultar en un funcionamiento inadecuado.
- Los equipos portátiles de comunicaciones RF (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) deben usarse a no menos de 30 cm del receptor, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría haber una degradación del rendimiento de este equipo.



ADVERTENCIA: Según la Seguridad 60601-1



PRECAUCIÓN:

- No lo uses si el receptor o los monitores están rotos.
- No uses el equipo en campos electromagnéticos fuertes.
- No utilice el producto en ambientes con mezclas anestésicas inflamables, oxígeno o óxido nitroso.
- Desconecta la fuente de alimentación antes de limpiar.
- Utiliza solo el receptor con accesorios aprobados y solo conforme a las instrucciones.
- No intentes reparar el dispositivo tú mismo.
- Retira las pilas cuando el dispositivo no esté en uso o cuando se almacene durante un periodo prolongado.
- No uses pilas no recargables. Las pilas alcalinas conllevan el riesgo de sobrecalentarse y estropear el dispositivo.



NOTA:

- Este dispositivo está pensado únicamente para ser utilizado como ayuda por los cuidadores. El producto no debe sustituir la supervisión humana.
- Asegúrese de que las instrucciones de uso cubren el dispositivo que se está usando, es decir, que se indique el mismo número de versión en la portada.
- El dispositivo solo debe ser utilizado por cuidadores expertos y no debe ser utilizado por operadores que no hayan comprendido el contenido de este manual.
- El cuidador es responsable de evaluar los riesgos del uso de este equipo y de cualquier entorno relacionado con ello.
- Para cargar las baterías del receptor, este debe estar conectado a una fuente de alimentación USB de 5V capaz de suministrando un mínimo de 500mA.
- No utilice este dispositivo para ningún propósito distinto al especificado por el fabricante.
- Ajustar el volumen puede hacer que el sonido de notificación no se escuche.
- Pruebe siempre el dispositivo antes de usarlo y cuando ajustes los ajustes.
- Pruebe regularmente el dispositivo según se describe en estas instrucciones para su uso. Asegurándose, mediante pruebas, que las notificaciones de alarma se reciban en la(s) ubicación(es) del cuidador. Véase **la página 19**.
- Debe realizarse una evaluación de riesgos para determinar si el nivel de fiabilidad ofrecido por el sistema es suficiente o si se necesita equipo adicional. Se debe tener en cuenta la probabilidad de que el paciente manipule el sistema.
- No se permite el mantenimiento del producto durante su uso.
- Limpie y desinfecte cada artículo según sea necesario, de acuerdo con la información de la **página 18**.
- Algunos accesorios llevan pequeños tornillos y bolsas de plástico. Asegúrese de que no se alteren la posesión de personas vulnerables que pueden atragantarse con ellos.
- Como ocurre con todo equipo electrónico, existe la posibilidad de que el equipo interfiera o se vea afectado por interferencias de otros dispositivos eléctricos o electrónicos. Por esta razón, evite colocar el dispositivo, sensor o cable(s) de conexión en proximidad a dispositivos electrónicos sensibles o dispositivos que produzcan campos electromagnéticos fuertes como transmisores de radio, teléfonos móviles o cables de alimentación.
- Para mantener la seguridad básica y el rendimiento esencial respecto a las perturbaciones electromagnéticas durante la vida útil esperada, no se requieren instrucciones.

2.7 Consulta con un profesional sanitario

Llame a los servicios de emergencia cuando se requiera atención médica inmediata.

Es importante consultar a un profesional sanitario:

- Si no está claro si el dispositivo (o el monitor compatible) es adecuado para la condición del paciente.
- Si el paciente experimenta diferencias en sus síntomas, por ejemplo, tipo o duración de síntomas.

2.8 Explicación de las marcas usadas en el dispositivo y en la documentación

Consulta estas instrucciones antes de usarlas.



LOT

Código de lote.

SN

Número de serie.

REF

Referencia.



Fabricante del número de catálogo.



Fecha de fabricación.



Mantener seco.



Frágil, maneje con cuidado.



Límite de temperatura.



Límite de humedad.



Límite de presión atmosférica.

IP64

Indica el nivel de protección del dispositivo.



Corriente continua.



Precaución: Consulta la información de seguridad en estas instrucciones para su uso.



Consulta las instrucciones de uso.



Marcado CE (el producto cumple con las directivas y regulaciones pertinentes de la UE).



Marca UKCA (el producto cumple con la normativa aplicable del Reino Unido).



Símbolo de la Directiva Europea sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (Directiva WEEE) 2019/19/UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

RoHS

Indica que el producto cumple con la directiva europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (comúnmente conocida como Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas o RoHS).



Información del importador.

3 CONTENIDO DEL PAQUETE

Tu paquete contendrá lo siguiente:

1 x	Receptor Alert-iT	[Parte #: P201]
2x	Pilas recargables AAA [Ni-MH 1.2V] (Instaladas)	[Parte #: P160G]
1x	Clip de cinturón	[Parte #: P204A]
1x	Cordón	[Parte #: P204B]
1x	Cargador USB de 5V (incluye cable USB tipo C de 1,5 m)	[Parte #: P167*B]

3.1 Productos compatibles

El receptor es compatible con todos los monitores y transmisores Safelink™ de Alert-iT.

Nota: Para más información, por favor contacte con su proveedor de equipos.

4 RESUMEN DEL SISTEMA

4.1 Receptor Alert-iT Pager



4.2 Luces de estado

Estado de la batería: Verde intermitente = Cargando.

Verde fijo = Carga completa.

Rojo intermitente = Batería crítica

Rojo sólido = Fallo de carga (*véase sección 4.3).

Estado del monitor: Amarillo intermitente = Alarma de fallo/baja/media prioridad.

Rojo intermitente = Alarma de alta prioridad.

Estado del receptor: Amarillo intermitente = fallo en la conexión de radio.

Rojo intermitente = Asistencia activa o llamada de ayuda.

4.3 Fallos de carga

El receptor indicará si hay un problema de carga. Por ejemplo, si el receptor está cargado sin pilas instaladas.

Nota: Si el receptor ha estado sin uso durante un periodo prolongado y las pilas se han descargado completamente sin energía, el receptor puede indicar un fallo al insertar el cargador. Dejar el cargador enchufado durante 30 minutos y luego retirarlo y volver a insertarlo suele ser suficiente para reiniciar la carga correctamente.

4.4 Características del receptor

El receptor Alert-iT está diseñado especialmente para entornos de atención domiciliar y profesional.

Las características específicas de esto son:

- Gran pantalla retroiluminada con indicaciones detalladas de alarma.
- Reseteo en la fuente de la alarma para cumplir totalmente con el deber de cuidado.
- Señal de radio de largo alcance.
- Larga duración de la batería para cubrir más de 24 horas de uso continuo con una sola carga.
- Tres niveles de gravedad de alarma (más indicación de fallo).
- Configurable para uso individual o grupal.
- Tonos audibles con volumen ajustable que indican el nivel de severidad.
- Reprogramación sencilla del nombre y ubicación del monitor.

En el uso normal, todos los cuidadores tienen un protocolo muy sencillo:

- El receptor indicará la ubicación y el nivel de gravedad de una alarma.
- La indicación puede ir acompañada de una alerta audible y/o vibración.
- El cuidador puede silenciar temporalmente el sonido/vibración con una sola pulsación de tecla.
- El cuidador atiende al paciente y reinicia la alarma en su habitación.
- El receptor se reinicia automáticamente.

Existen algunos parámetros básicos muy simples que el cuidador puede cambiar, dependiendo del nivel autorizado por el supervisor. Todos los usuarios pueden:

- Resetear las alarmas que pueden haberse quedado atascadas si el monitor está dañado o ya no está en el lugar.

Los usuarios con permisos pueden:

- Cambiar funciones básicas de la interfaz como el brillo de la pantalla y los pitidos de las teclas.
- Alternar entre ajustes de volumen y vibración "Estándar" y "Modo no molestar".
- Añadir, eliminar y editar monitores emparejados.

Por defecto; los usuarios pueden **"Apagar"** el receptor, pero no pueden **"Gestionar sensores"**.

Nota:

-La opción de apagar el receptor puede ocultarse a un usuario desde el menú de configuración de "Usuario avanzado" > "Ajustes avanzados" > "Usuario" > "APAGAR" e indicar "NO".

-El permiso de gestionar sensores emparejados puede ocultarse desde el menú de configuración "Usuario Avanzado" > "Ajustes avanzados" > "Usuario" > Gestionar sensores" e indicar "NO".

4.5 Notificaciones de alarma

Al recibir una notificación de alarma, el receptor emitirá un tono audible y/o vibrará. La pantalla se activará automáticamente y mostrará el motivo de la alarma.

La Notificación de Alarma mostrará:

- **Nombre:** El nombre del sensor que envía la alarma.
- **Ubicación:** La localización del sensor.
- **Sensor:** El tipo de sensor que ha enviado la alarma.
- **Aviso:** El tipo de aviso que el receptor ha recibido.
- **Tiempo transcurrido:** desde que el receptor recibió la alarma.



Las notificaciones de alarmas se ordenan por prioridad, así que, si hay varias alarmas activas las alarmas de prioridad se mostrarán encima de las de menor prioridad. La prioridad de alarma se indica con el color del borde de la alarma:

- Alta Prioridad = Borde Rojo.
- Prioridad Media = Borde naranja.
- Baja prioridad = Borde amarillo.
- Fallo = Borde negro.

Las notificaciones de alarma pendientes pueden ser aceptadas "**Aceptar**" o silenciadas "**Silenciar**".

*Nota1: "**Aceptar**" una alarma silenciará la alarma en cualquier otro receptor emparejado con ese sensor. Nota2: Si el receptor solo está emparejado con un sensor, no habrá opción para "**Silenciar**" ninguna alerta.*

Seleccionar "**Aceptar**" o "**Silenciar**" silenciará la alerta durante "**5 minutos**".

Nota 3: Este periodo se puede ajustar en el menú de ajustes.

Solo en el receptor de 128 canales:

Si se ha activado la llamada de asistencia o ayuda "**Usuario Avanzado > "Ajustes avanzados" > "Usuario avanzado" > "Llamada ayuda"** e indicar "**Si**" permitirá al cuidador solicitar ayuda pulsando el botón "**Asist**". Esto alertará a otros receptores de que se necesita más ayuda.

4.6 Reseteo de alarmas



Los sensores de Alert-iT suelen estar en modo "**Resetear desde el sensor**". Esto significa que el usuario debe ir a la ubicación del paciente para resetear el sensor y así borrar la alarma del receptor.

4.7 Duración de las alarmas

La notificación de alarma en el receptor muestra la "**Duración**" desde que la alarma fue recibida por el receptor. A menudo es útil saber cuánto tiempo lleva el paciente en estado de angustia. Al resetear la alarma en el sensor, la notificación de alarma se borra de la pantalla del receptor, se detiene el temporizador expirado y el evento se escribe en el registro de historial de alarmas "**Hist.Alarmas/Fallos**".

Por lo tanto, si se desea saber cuánto tiempo ha estado con el paciente, no se debe resetear la alarma al llegar a la habitación. En su lugar, debe silenciar la alarma en su receptor pulsando "**Aceptar**", atender al paciente, comprobar su estado y resetear la alarma desde el sensor.

4.8 Uso de modos "estándar" y "no molestar"

El receptor puede alternarse rápidamente entre un modo "**Estándar**"  y un modo "**no molestar**"  en el menú para cambiar rápidamente entre dos ajustes configurables de volumen y vibración.

5 CONFIGURACIÓN INICIAL

5.1 Uso del clip de cinturón y el cordón

El receptor viene equipado con un clip de cinturón desmontable y un cordón que pueden usarse para colgar el receptor del cuello o meterlo en el bolsillo sin que pueda caerse al suelo.



5.2 Carga

El receptor debe cargarse antes de su uso inicial.

El receptor puede cargarse con un cargador USB Tipo-C.

El tiempo de carga típico es de 2-3 horas.

Nota: Algunos puertos USB no pueden suministrar suficiente energía para cargar el receptor. El receptor debe estar conectado a un cargador USB capaz de suministrar al menos 500mA. El receptor detectará automáticamente e impedirá la carga si está conectado a un puerto que no sea capaz de hacerlo.

5.3 Pruebas de distancia

Es esencial comprobar que todos los sensores sean capaces de llegar al receptor con su señal de radio, activando una alarma en el sensor y asegurándose de que el receptor se active en todos los lugares donde se debe usar el receptor.

Si el alcance de la señal de radio es un problema, los amplificadores de señal de radio de Alert-it con referencia **P164** pueden usarse para ampliar el alcance del sistema. Múltiples repetidores de radio pueden "encadenarse" para ampliar aún más el alcance.

6 FUNCIONES BÁSICAS

6.1 Encendido del receptor

Para encender el receptor:

- Mantenga pulsado cualquier botón durante 3 segundos.

Al encender, la pantalla del receptor mostrará la versión del software, el número de canales del receptor y la banda de radio durante 10 segundos.

Nota: Si se retiran las pilas durante un periodo prolongado, se perderá la fecha y la hora.

Todas las funciones de registro quedarán suspendidas hasta que la fecha y hora se vuelvan a establecer a través del menú de

"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Fecha y hora"

6.2 Activar la pantalla

Para ahorrar energía, la pantalla se apaga tras un breve periodo de inactividad.

Para activarla:


- Pulsa brevemente **cualquier** botón para activar la pantalla.

Nota: El tiempo de espera de la pantalla puede ajustarse en el menú de ajustes avanzados.

"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Pantalla OFF" y elegir el tiempo

6.3 Apagado del receptor

Para apagar el receptor:

- Activar la pantalla pulsando brevemente **cualquier** botón.
- Pulsar el botón de selección izquierdo para entrar en el menú de configuración 
- Usar el teclado para seleccionar **"Usuario"** o **"Usuario avanzado"**
- Desplácese hacia abajo hasta que vea **"Apagar"**.
- Pulsar el botón de selección derecho para apagar el receptor.

Nota: La posibilidad de apagar el receptor puede ocultarse a usuarios no autorizados desde el menú de configuración:

"Usuario avanzado" > "Ajustes avanzados" > "Usuario"> "Apagar" y elegir la opción "No"

6.4 Responder a notificaciones de alarma

Al recibir una notificación de alarma, el receptor emitirá un tono audible y/o vibrará. La pantalla se activará automáticamente y mostrará el motivo de la alarma.


Para silenciar la alarma, el usuario debe pulsar el botón **"Aceptar"** si va a atender al usuario. O pulsar el botón de **"Silenciar"** si están ocupados con otra alarma o alguien más está atendiendo.

*Nota: Si solo hay un sensor emparejado con el receptor, el botón **"Silenciar"** quedará oculto.*

7 FUNCIONES ADICIONALES

7.1 Resetear alarmas desde sensores inaccesibles

Si por algún motivo no se puede acceder al botón de **"Reset"** de un sensor para borrar una alarma, o porque se ha apagado un monitor emparejado y está configurado para enviar el fallo de **"Monitor apagado"**. Puedes borrar todas las alarmas activas mediante:

- Pulsar el botón de selección izquierdo para entrar en el menú 
- Seleccionar **"Usuario"** o **"Usuario avanzado"**.
- Usar el teclado para desplazarse hacia abajo hasta ver **"Resetear alarmas"**.
- Pulsar el botón de selección derecho para eliminar cualquier alarma activa del receptor.

Nota: Si el monitor sigue encendido y en estado de alarma, el receptor volverá a sonar en ~2 minutos para dispositivos no SecureLink o ~10 segundos para dispositivos habilitados para SecureLink.

7.2 Comunicaciones de receptor a receptor (Solo disponible en el receptor de 128 canales)

El receptor es capaz de comunicar la aceptación de llamadas de alarma a otros receptores. Para activar la función:

"Usuario avanzado" > Ajustes receptor" > Señal receptor" y asignar un numero diferente a cada receptor.

Una vez habilitado, si un usuario pulsa **"Aceptar"**, todos los demás receptores mostrarán **"Aceptada"** bajo la alarma y sabrán que otro usuario la ha aceptado.

7.3 Llamadas de asistencia (Solo disponible en receptor de 128 canales)

En entornos con varios receptores, puedes permitir que el cuidador llame para pedir ayuda con una alerta concreta.

Nota: Otros receptores solo recibirán esta alerta de asistencia, junto con la ubicación de ese sensor si ese receptor también está emparejado con el receptor que pide la asistencia. Para facilitar:

- Buscar **"Usuario Avanzado > "Ajustes avanzados" > "Usuario avanzado" > "Llamada ayuda"** e indicar **"Si"**
- Navegar hasta **"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Señal receptor"** > Configurar cada receptor con un **"señal receptor"** única(001,002,003..etc).

Una vez habilitado, el usuario puede iniciar una llamada de asistencia mediante:

- Pulsando **"Aceptar"** en una alerta.
- Luego pulsar **"Asist"** en la alerta.

Para cancelar: Pulse el botón **"Asist"**.

7.4 Llamadas de ayuda SOS (Solo disponible en receptores 128 canales)

En entornos con varios receptores, puede permitir que el usuario envíe una llamada general de **"ayuda"** a otros receptores en la zona si necesitan asistencia.

Nota: Las llamadas de ayuda también deben estar activadas en todos los demás receptores en los que se desea que se reciba la llamada de ayuda. Para activarlo:

- Busque **"Usuario Avanzado > "Ajustes avanzados" > "Usuario avanzado" > "SOS"** e indicar **"Si"**
- Navegar hasta **"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Señal receptor"** > Configurar cada receptor con un **"señal receptor"** única(001,002,003, etc.).

Una vez habilitado, el usuario puede iniciar una llamada de ayuda:

-
- Activando la pantalla pulsando cualquier botón.
 - **Manteniendo pulsado el botón central de selección** durante **5 segundos**, luego pulsando el botón superior derecho para confirmar.
- Para cancelar la llamada: Pulse el botón **"Cancelar"**.

8 CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

Debido a la gran variedad de entornos en los que se utiliza los receptores, es esencial que el gestor o cuidador principal configure el receptor adecuadamente para su entorno.

La siguiente sección detalla los entornos típicos y los ajustes sugeridos que deben configurarse.

8.1 Domicilio particular con sensor Único

Recomendamos que considere:

- Configurar la hora y la fecha para activar las funciones de registro.
"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Fecha y hora"
- Permitir que el usuario gestione los sensores
"Usuario Avanzado" > "Ajustes avanzados" > "Usuario" > Gestionar sensores" e indicar **"Sí"**.

8.2 Centro de atención pequeño con múltiples sensores y un solo receptor

Recomendamos que considere:

- Configurar la hora y la fecha para activar las funciones de registro: **"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Fecha y hora"**
- Configurar el modo vista a Nuevo primero: **"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Visualiza: " e indicar Nuevo Primero**
- No permitir que un usuario sin autorización gestione los sensores: **"Usuario Avanzado" > "Ajustes avanzados" > "Usuario" > Gestionar sensores"** e indicar **"No"**.
- No permitir que un usuario sin autorización apague el receptor
"Usuario avanzado" > "Ajustes avanzados" > "Usuario" > "Apagar" y elegir la opción "No"
- Cambia la contraseña predeterminada para evitar el acceso al menú de usuario avanzado.
"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Contraseña " e indicar la nueva contraseña.

8.3 Centro de atención media con múltiples sensores y varios receptores

Recomendamos que considere:

- Configurar la hora y la fecha para activar las funciones de registro: **"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Fecha y hora"**
- Configurar **"Modo Vista"** como **"Prioridad"**.
"Usuario avanzado" > "Ajustes receptor" > "Visualiza: " e indicar Prioridad
- Solo emparejar cada receptor con los sensores a los que el usuario de este receptor debe responder.
- Emparejar el receptor con sensores en estado desactivado (véase **la sección 9.5**), para que las llamadas de asistencia proporcionen información de ubicación.

- No permitir que el usuario sin autorización gestione los sensores: "**Usuario Avanzado**" > "**Ajustes avanzados**" > "**Usuario**" > "**Gestionar sensores**" e indicar "**No**".
- No permitir que el usuario sin autorización apague el receptor: "**Usuario avanzado**" > "**Ajustes avanzados**" > "**Usuario**" > "**Apagar**" y elegir la opción "**No**".
- Permitir que los cuidadores puedan hacer llamadas de ayuda (**Solo disponible en el receptor de 128 canales**):
 Buscar "**Usuario Avanzado**" > "**Ajustes avanzados**" > "**Usuario avanzado**" > "**Llamada ayuda**" e indicar "**Si**".
 Navegar hasta "**Usuario avanzado**" > "**Ajustes receptor**" > "**Señal receptor**" > Configurar cada receptor con una "**señal receptor**" única (001,002,003, etc.)
- Permitir que los cuidadores puedan hacer llamadas de SOS (**Solo disponible en el receptor de 128 canales**):
 Buscar "**Usuario Avanzado**" > "**Ajustes avanzados**" > "**Usuario avanzado**" > "**SOS**" e indicar "**Si**".
 Navegar hasta "**Usuario avanzado**" > "**Ajustes receptor**" > "**Senal receptor**" > Configurar cada receptor con un "**señal receptor**" única (001,002,003, etc.)
- Cambiar la contraseña predeterminada para evitar el acceso al menú de ajustes avanzados.
 "**Usuario avanzado**" > "**Ajustes receptor**" > "**Contraseña**" e indicar la nueva contraseña.

9 EMPAREJAR SENSORES AL RECEPTOR

9.1 Emparejamiento

Los sensores pueden apagarse durante el día (llave colocada para desactivarlos) para evitar alarmas involuntarias o pueden desactivarse desde el receptor (véase la sección 9.5).

9.2 Nombres y ubicaciones

Para facilitar la identificación de la alarma, cada sensor puede etiquetarse con un "**Nombre**" y una "**Ubicación**" definibles por el usuario, lo que se une a la descripción del sensor que genera la alarma, para una mejor comprensión de la situación.

Puede decidir cómo agrupar mejor los sensores, por ejemplo:

- Para un usuario con varios sensores:
 Nombre: Juan Ubicación: Dormitorio Sensor: Cama/silla
 Nombre: Juan Ubicación: Salón Sensor: Avisador Baño
 Nombre: Juan Ubicación: Baño Sensor: Puerta
- Para varios usuarios en un mismo lugar:
 Nombre: Juan Ubicación: Habitación Sensor: Cama/silla
 Nombre: Maria Ubicación: Habitación Sensor: Cama/silla
- Para sensores no asignados a usuarios:
 Nombre: Habitación 32. Ubicación: Habitación Sensor: Puerta

9.3 Emparejando un nuevo sensor

- Para añadir un nuevo sensor
 "**Usuario avanzado**" > "**Gestion sensores**" >
- Pulsa el botón **+**
- Introduce un "**Nuevo Usuario**" (nombre de un usuario, nombre de una habitación, etc.). Pulse la "**V**" para aceptar.



- Selecciona el nombre introducido de la lista de **"Usuarios"**.
- Pulsa el **+** botón para añadir un sensor a este usuario.
- Introduce una **"Ubicación"** para este sensor(hay varias predefinidas, pero es posible añadir más)
- Introduce la dirección (Address) del sensor/monitor que se quiere emparejar (ver etiqueta del sensor). Será un número desde el 001 al 128.
- Selecciona en **"Sensor"** el tipo de monitor/sensor que está emparejando (sensor cama/silla, puerta, etc.) de la lista desplegable.
- Pulsa el botón derecho la **"V"** para guardar el sensor.

9.4 Eliminar un sensor

- Para eliminar un sensor.
"Usuario avanzado" > "Gestion sensores" >
- Pulsa el botón central para seleccionar el **"Nombre"** del usuario del que deseas eliminar.
- Seleccionar el sensor que deseas eliminar.
- Pulsa el **🗑️** botón para quitar el sensor.
- Pulsa el botón derecho **"V"** para confirmar.

9.5 Desactivar un sensor

- Para dejar desactivar un sensor se debe seguir este procedimiento.
"Usuario avanzado" > "Gestion sensores" > "Estado alarma" > e indicar 

10 ESTADO DE LA BATERÍA Y VIDA ÚTIL

El receptor funciona con 2 pilas recargables Ni-MH de 1,2V de tamaño AAA de alta calidad que deberían durar varios años antes de que necesiten ser reemplazadas.

La duración de la batería variará entre 24 y 40 horas dependiendo de las funciones activadas y la frecuencia de las alarmas y lo rápido que se responden a las alarmas. La retroiluminación de la pantalla es la función que más energía consume.

Cuando la batería llega a un estado bajo, aparecerá una advertencia de **"Batería baja"** en la pantalla. El receptor debe cargarse lo antes posible.

Cuando la batería llega a un estado crítico, aparece una advertencia de **"SIN ALARMAS - ¡Cargue Ahora!"** en la pantalla y una alerta sonará cada 10 segundos durante 10 minutos. Tras 10 minutos de advertencia de batería crítica el receptor se apagará.

 Cuando aparezca la advertencia de **"SIN ALARMAS - ¡Cargue Ahora!"** ya no se recibirán alarmas de los pacientes y el receptor debe cargarse inmediatamente.

 Cuando aparezca la advertencia de **"SIN ALARMAS - ¡Cargue Ahora!"** receptor debe dejarse cargando al menos 2 horas para conseguir una carga completa.

Nota1: La "hora y fecha" deberá restablecerse si las pilas se han retirado antes de cualquier registro.

Nota2: La "hora y fecha" también deberán reiniciarse si las pilas se han dejado en un estado crítico entre 1 a 2 semanas.

Consulte las secciones **4.2** y **4.3** para el comportamiento del receptor durante la carga.

11 MENÚ AVANZADO > AJUSTES RECEPTOR

La siguiente sección ofrece orientación sobre los ajustes contenidos en el menú "**Usuario avanzado**" > "**Ajustes receptor**".

Brillo

Esto ajusta el brillo de pantalla del modo seleccionado actualmente (Estándar / No molestar). Tenga en cuenta que los ajustes de brillo más altos reducirán la duración de la batería.

Sonido teclas

Este es un sonido audible que se produce cada vez que se pulsa un botón del teclado en modo estándar.

Ver información

Esta pantalla muestra información básica sobre el dispositivo y puede ser útil durante las llamadas de soporte para identificar el dispositivo y la versión de software que está ejecutando.

Nombre receptor

Se puede configurar un nombre de receptor para ayudar a identificar el receptor. Este nombre aparece en la barra de título principal de la pantalla de inicio.

Fecha y hora

El receptor incluye dos registros: un historial de "**Alarmas y fallos**" y un "**Historial del receptor**".

Nota: El registro requiere establecer la hora y la fecha antes de que pueda comenzar el registro. Si estos registros no son necesarios, no es necesario establecer la fecha ni la hora.

Modo estándar y no molestar

Puede ajustar el volumen y la vibración para cada uno de estos modos en esta opción, de tal forma que puede establecer un volumen y vibración diferentes para cada modo, por ejemplo, con sonido alto y sin vibración durante el día (modo estándar) y sin sonido y con vibración durante la noche (modo no molestar).

Silenciar aviso

Esta configuración determina cuánto tiempo estará en silencio el receptor cuando se acepta o se pospone una alarma.

Posponer fallos

Esta configuración determina cuánto tiempo permanece silenciado el receptor cuando se descarta un fallo.

Apagado automático pantalla

Esta configuración configura cuánto tiempo permanece encendida la pantalla. Aumentar este ajuste reducirá la duración de la batería, especialmente en entornos concurridos donde hay alarmas frecuentes.

Modo de visualización

Esta opción alterna entre:

- **Prioridad:** Las alarmas de máxima prioridad se muestran por encima de las de menor prioridad. Por ejemplo, si un usuario ha pedido asistencia en una habitación pulsando el botón "Call" del monitor/emisor y posteriormente otro usuario sale por la puerta de la habitación y dispara el sensor de puerta, esta segunda alarma tendrá prioridad sobre la primera y será la que aparecerá en el receptor, hasta que se resetee la primera alarma. En ese momento, aparecerá la alarma de menor prioridad.
- **Nuevo primero:** Las alarmas más recientes se muestran por encima de las que han sido activadas con anterioridad, sin tener en cuenta la prioridad de la alarma. La última será la que aparezca en el receptor.

Contraseña

La contraseña predeterminada de configuración avanzada es "**1009**". La contraseña puede cambiarse aquí si es necesario.



Se requiere una aplicación para PC con Windows para restablecer esta contraseña si se olvida.

12 LIMPIEZA



Puede limpiar el receptor con un paño húmedo, un producto de limpieza neutro o un desinfectante suave. Evite que entre líquido en el conector USB o en el agujero del sonido.



Desconecte siempre el cable de carga antes de limpiar el dispositivo. Seque bien todas las partes después de limpiar.

13 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

iTs Designs Ltd. (T/A Alert-iT Care Alarms) es responsable de garantizar la seguridad, fiabilidad y rendimiento del dispositivo, siempre que:

- El dispositivo se instale, utilice y limpie de acuerdo con las instrucciones de estas instrucciones de uso.
- Cualquier cambio en el dispositivo, mantenimiento o reparación es realizado por una persona formada por Alert-iT o sus representantes.
- Cualquier repuesto o accesorio utilizado ha sido aprobado por Alert-iT.

14 ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO DESPUÉS DE SU USO



De conformidad con la Directiva sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (Directiva WEEE), el dispositivo debe recogerse por separado y devolverse a una instalación autorizada de recogida. El propietario debe llevar el dispositivo al punto de recogida de residuos especificado por las autoridades locales.

Para más información sobre cómo deshacerse del dispositivo, por favor contacte con las autoridades competentes.

15 DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

El fabricante, iTs Designs Ltd., declara que este producto cumple con el Reglamento de Equipos de Radio (Reino Unido) de 2017 y la Directiva de Equipos de Radio (2014/53/UE).

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet;

www.alert-it.co.uk/support/

Cumplimiento electromagnético

- Cumple con las cláusulas 4.3, 7 y 8 de la IEC 60601-1-2.
- Clase de emisiones IEC 55011: Clase B.
- Nivel de prueba de inmunidad: 10V/M. Criterios de rendimiento: B.
- Límites de emisiones y niveles de prueba de inmunidad aplicados para IEC 60601-1-11 Entorno de atención sanitaria domiciliaria.

16 REVISIONES PERIÓDICAS

16.1 Comprobaciones diarias

Active la pantalla y asegúrese de que el receptor esté encendido antes de empezar su turno.

Nivel de batería

Asegúrese de que la batería tenga suficiente carga antes de empezar su turno.

Modo normal / no molestar

Asegúrese de que el receptor esté configurado en el modo correcto antes de usarlo.

16.2 Comprobaciones semanales

Estado de los cables

Compruebe el estado de los cables de los sensores.

Activación de la alarma

Asegúrese de que las notificaciones de alarma estén siendo recibidas por el/los cuidador(es). Active manualmente una alarma si es necesario para comprobarlo.

17 REACONDICIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO ANTES DE SU REUTILIZACIÓN

Para devolver el receptor a sus valores predeterminados de fábrica, realice los siguientes pasos:

Paso 1) Elimine cualquier sensor emparejado como se describe en la sección **"9.4 Eliminando un sensor"**.

Paso 2) Entre en el menú de configuración avanzada y seleccione **"Borrar historial"**.

Paso 3) Entre en el menú de ajustes avanzados y seleccione **"Restablecer ajustes"**.

18 ALERTA-IT DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

En el poco probable caso de que su producto necesite servicio de garantía, por favor contacte con su proveedor, distribuidor o fabricante. Para evitar cualquier inconveniente innecesario por su parte, le recomendamos que lea estas instrucciones cuidadosamente antes de solicitar un servicio de garantía.

GARANTÍA

Con esta Garantía, Alert-iT garantiza que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra en la fecha de compra original durante un periodo de tres (3) años a partir de esa fecha.

Si dentro del periodo de garantía se determina que el producto es defectuoso (en la fecha de la compra original) debido a materiales o mano de obra inadecuadas, Alert-iT, sin coste por mano de obra o piezas, la reparará o (a elección de Alert-iT) reemplazará el producto o sus piezas defectuosas, sujeto a los términos y limitaciones a continuación. Alert-iT puede reemplazar productos o piezas defectuosas por productos o piezas nuevas o reacondicionadas. Todos los productos y piezas retenidos que se reemplazan pasan a ser propiedad de Alert-iT.

TÉRMINOS

Los servicios de garantía solo se prestarán si la factura original o el recibo de venta (que indica la fecha de compra, el nombre del modelo y el nombre del distribuidor) se presenta con el producto defectuoso dentro del periodo de garantía. Alert-iT puede rechazar el servicio de garantía gratuita si estos documentos no se presentan o si están incompletos o son ilegibles.

Esta Garantía no se aplicará si el nombre del modelo o el número de serie del producto han sido alterados o eliminados, o están ilegibles.

Esta Garantía no cubre los costes de transporte ni los riesgos asociados al transporte de su producto hacia y desde Alert-iT.

Esta garantía no cubre:

- a. Alfombras o sensores de humedad (véanse productos individuales para sus garantías).
- b. mantenimiento y reparación periódica o reemplazo de piezas debido al desgaste.
- c. consumibles (componentes que se espera requieran reemplazo periódico durante la vida útil de un producto, como baterías).
- d. daños o defectos causados por el uso, operación o tratamiento del producto incompatibles con lo descrito
- e. daños o cambios en el producto como resultado de:
 - i. Mal uso, incluyendo:
 - el tratamiento que provoca daños físicos, cosméticos o superficiales o cambios en el producto.
 - no instalar o utilizar el producto para su propósito normal o conforme a las instrucciones de Alert-iT sobre instalación o uso.
 - no mantener el producto conforme a las instrucciones de Alert-iT sobre el correcto mantenimiento.
 - instalación o uso del producto de manera incompatible con las leyes técnicas o de seguridad

o estándares en el país donde se instala o se utiliza.

- ii. el estado o defectos en los sistemas con los que se utiliza o incorpora el producto, excepto otros productos de Alert-iT diseñados para usarse con el producto.
- iii. el uso del producto con accesorios, equipos periféricos y otros productos de un tipo, condición y estándar distintos a los prescritos por Alert-iT.
- iv. reparación o intento de reparación por personas no autorizadas por Alert-iT.
- v. ajustes o adaptaciones sin el consentimiento previo por escrito de Alert-iT, incluyendo:
 - mejorar el producto más allá de las especificaciones o características descritas en las instrucciones de uso, o modificaciones para ajustarlo a estándares técnicos o de seguridad nacionales o locales en países distintos a aquellos para los que el producto fue específicamente diseñado y fabricado.
- vi. Negligencia
- vii. accidentes, incendios, líquidos, productos químicos, otras sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, tensión de alimentación o entrada excesiva o incorrecta, radiación, descargas electrostáticas incluyendo iluminación, otras fuerzas externas e impactos.

Esta garantía cubre únicamente los componentes hardware del producto.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Excepto lo indicado anteriormente, Alert-iT no ofrece garantías (expresas, implícitas, legales o de otro tipo) respecto a la calidad, rendimiento, precisión, fiabilidad, idoneidad para un propósito concreto o el software acompañante o constituyente. Si esta exclusión no está permitida o plenamente permitida por la ley aplicable, Alert-iT excluye o limita sus garantías solo en la máxima medida permitida por la ley aplicable. Cualquier garantía que no pueda ser completamente excluida estará limitada (en la medida de lo permitido por la ley aplicable) a la duración de esta Garantía.

La única obligación de Alert-iT bajo esta Garantía es reparar o reemplazar productos sujetos a estos términos y condiciones de la Garantía. Alert-iT no se hace responsable de ninguna pérdida o daño relacionado con productos, servicios, esta garantía o de otro tipo, incluyendo pérdidas económicas o intangibles - el precio pagado por el producto - pérdida de beneficios, ingresos, datos, disfrute o uso del producto o de cualquier producto asociado - indirecto, incidental o consecuencial. Esto se aplica tanto si esa pérdida o daño se refiere a: deterioro o no funcionamiento del producto o productos asociados por defectos o falta de disponibilidad mientras se utiliza Alert-iT, lo que ha causado tiempo de inactividad, pérdida de tiempo de usuario o interrupción del negocio, inexactitud en la salida del producto o productos asociados.

Esto se aplica a pérdidas y daños bajo cualquier teoría legal, incluyendo negligencia y otros delitos civiles, incumplimiento de contrato, garantía expresa o implícita y responsabilidad objetiva (incluso cuando Alert-iT ha sido informado de la posibilidad de tales daños).

Cuando la ley aplicable prohíbe o limita estas exclusiones de responsabilidad, Alert-iT excluye o limita su responsabilidad solo en la máxima medida permitida por la ley aplicable. Por ejemplo, algunos países prohíben la exclusión o limitación de daños derivados de negligencia, negligencia grave, mala conducta intencionada, engaño y actos similares. La responsabilidad de Alert-iT bajo esta garantía en ningún caso superará el precio pagado por el producto, pero si la ley aplicable solo permite limitaciones de responsabilidad más elevadas, se aplican dichas limitaciones más estrictas.

DERECHOS LEGALES RESERVADOS

Los consumidores tienen derechos legales (estatutarios) bajo las leyes nacionales aplicables relativas a la venta de productos de consumo. Esta garantía no afecta a los derechos legales que puedas tener, ni a aquellos derechos que no pueden excluirse o limitarse, ni a los derechos contra la persona a quien compraste el producto. Puedes invocar cualquier derecho que tengas a tu entera discreción.

19 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El equipo está diseñado para un funcionamiento continuo.

Unidad de control

Modelo:	P201.
Baterías:	2x AAA 1,2V Ni-MH recargable 800mAh (HR03).
Duración de la batería:	Hasta 40 horas (entre 24 y 36 horas).
Entrada de energía:	5VDC @ 500mA.
Tiempo de carga:	~2 horas.
Conectores de entrada y salida:	USB Tipo-C (puerto de alimentación y datos).
Interruptores y controles:	Teclado con 7 botones de pulsación.
Luces de señalización:	Estado de la batería (Rojo /verde) Estado del sensor (Rojo / Amarillo / Verde) Estado del receptor (Rojo / Verde)

Nivel de sonido:	50-54 dBA @ 1m.
Tiempo de retraso desde la alarma hasta la salida de la señal:	< 1s.
Retención de memoria:	Toda la memoria se conserva tras la pérdida de energía.
Medidas:	122 x 72 x 20 mm (Alto x Ancho x Profundo).
Peso:	160g (incluyendo baterías).
Color:	Blanco.
Carcasa:	ABS Plástico.
Clasificación IP:	IP64.
Vida útil:	5 años.

Radiofrecuencia:	434.0750 MHz.
Potencia de salida de radio:	< 10 mW.
Rango señal de radio:	450 metros (línea de visión).
Radiofrecuencia:	869,2125 MHz.
Potencia de salida de radio:	< 10 mW.
Rango señal de radio:	450 metros (línea de visión).

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento:	5°C a 40°C (Úsalos en interiores).
Límite de humedad:	Máximo del 5% al 90%. Sin condensación.
Presión atmosférica:	700 hPa a 1060 hPa.
Temperatura de almacenamiento:	-30°C a 50°C.



Alert-it Care Alarms



ITs Designs Ltd,

Fernie House (Unit 3)
Coalville Bussiness Park
Jackson Street
Leicester, - UK
LE67 3NR

www.alert-it.co.uk

Para apoyo, por favor contacte con el proveedor de su equipo.

Importador de la UE para añadir detalles aquí, cuando corresponda.

UGARI GERIÁTRICA S.L.U
C/Venta de la Estrella nº 6 Pab 126
01006 Vitoria-Gasteiz
(Álava) España
ugari@ugari.es
www.ugari.es

