

EMPAPADOR FUSION

Secante, superabsorbente y extra-fino



Descripción:

- **ENTORNO SALUDABLE PARA LA PIEL DEL PACIENTE:** El empapador Fusion absorbe el líquido rápidamente y gracias a su tecnología patentada capaz, en cuestión de minutos, de secar casi completamente la superficie, evitando que la humedad esté en contacto con la piel de usuario.
- **AYUDA A REDUCIR LOS PUNTOS DE PRESIÓN:** La construcción laminada y extra-fina del empapador FUSION hace que este siempre quede plano, sin arrugas y pliegues en la superficie, evitando el roce con la piel y mejorando tanto la integridad del paciente como los puntos de presión.
- **AYUDA AL RENDIMIENTO DE COLCHONES ANTIESCARAS:** El perfil ultradelgado de FUSION no afecta a su rendimiento y es una ayuda con los protocolos de cuidado de la piel.
- **MENOS PESO, MÁS EMPAPADORES EN CADA LAVADO:** Debido al menor peso de los empapadores, caben más en cada lavado, minimizando costes. Además, su capa de poliéster facilita un secado super-rápido, ahorrando tiempo de secado.

Capacidad de absorción: Aproximadamente 2.000 ml.

Composición:

- 1ª capa (superior): Terciopelo de secado ultrarápido (poliéster 100% color verde claro (160 gr/m2) entretejido con la capa absorbente.
- 2ª capa doble absorbente: Capa no tejida (mezcla de poliéster 65% y rayón 35%. Super absorbente (235 gr/m2).
- 3ª capa (barrera): Película impermeable y transpirable de poliuretano entretejido con poliéster "cepillado" (150 gr/m2).
- Alas: Microfibra de 100% poliéster "cepillado" (110 gr/m2) 50x90cm.
- Hilo: Poliéster 100% alta resistencia.

Lavado:

Lavado: Pre-lavado suave antes de usar. No utilizar suavizante. El suavizante reduce la capacidad de absorción.

 LEJIA: Máximo 500 ml. al 1% por 45kg. de carga. Se recomienda el uso de blanqueadores oxigenados. Temperatura recomendada de lavado: 65°C máx. 90°C.

Secado: Temperatura recomendada secado: 65°C (Máx. 90°C).



Recomendable que quede en el producto un 3-5% de humedad.

Después de secado, se recomienda el uso de aire frío y seguidamente plegar y almacenar.

Referencias:

9100/FP/F: Empapador con barrera de poliuretano 89x89 cm con alas, (alas 50x90 cm).

BO3346: Bolsa empapador transparente de 33x46 cm opcional.

UGARI GERIÁTRICA

C/Venta de la Estrella 6, pab.126 - 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)
Tel (+34) 945 146 744; Fax (+34) 945 154 036; E-mail: ugari@ugari.es

www.ugari.es