




JUMBOREST - APOYABRAZOS UNIVERSAL CE

Corrección postural para todos los tipos de mesas. Universal, ajustable y portátil.

Desarrollado en colaboración con terapeutas ocupacionales.


- Diseñado para todo tipo de actividades en mesas de comedor, estudio, terapia, etc. sean rectangulares o redondas, incluso con faldón (hasta 130mm incluido tablero).
- También compatible con encimeras de cocinas adaptadas (con espacio libre bajo la encimera).
- Tornillo opcional para bloqueo en la posición deseada.
- Montaje e instalación extremadamente sencillos. Permite transportarlo fácilmente para su uso en casa, en el trabajo, el restaurante, etc.
- Ajustable sin herramientas a lo largo del tablero.
- El uso de dos unidades convierte cualquier mesa normal en una mesa ergonómica con escotadura.

Características técnicas

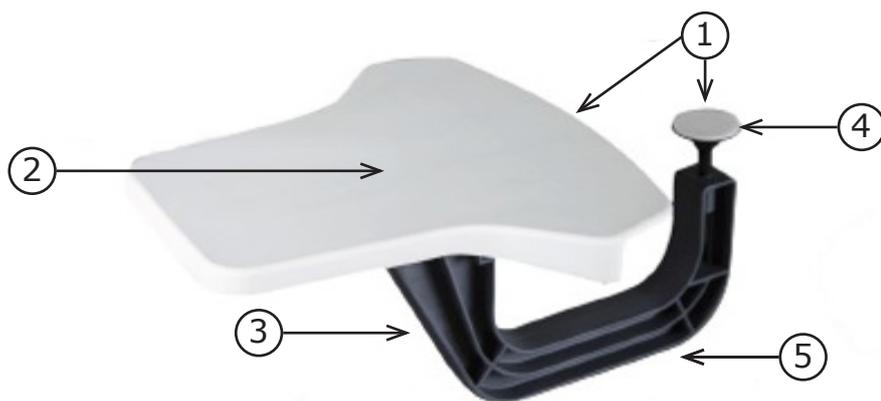


- ① Superficies anti-deslizantes para una correcta sujeción a la mesa.
- ② Zona de apoyo suave y de fácil limpieza.
- ③ Tres diferentes posiciones (derecha/central/izquierda): libre acceso para sillas de ruedas con apoyabrazos.
- ④ Sujeción ajustable: para tableros entre 20 y 45 mm de grosor.
- ⑤ Estructura resistente: soporta un peso de 100kg.


INSTRUCCIONES DE USO

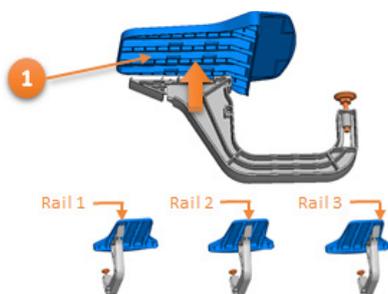

Alinear el extremo del brazo multi-posición en su alojamiento en la parte inferior de la superficie de apoyo (en posición izquierda, central o derecha).

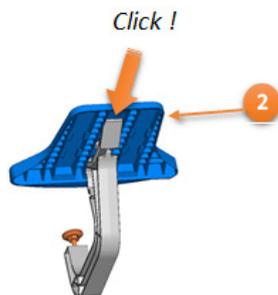

Presionar el brazo contra su alojamiento hasta oír un "click".

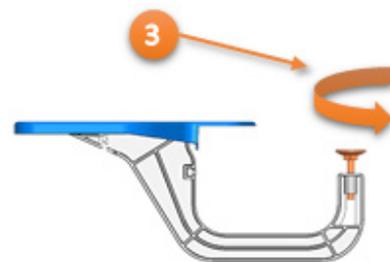


Girar el tornillo de sujeción hasta ajustarlo al grosor de la mesa.



Colocar el apoyabrazos en el borde de la mesa.



Para desmontar: tirar hacia fuera de la pieza del extremo del brazo y deslizar el brazo separándolo de la superficie de apoyo.

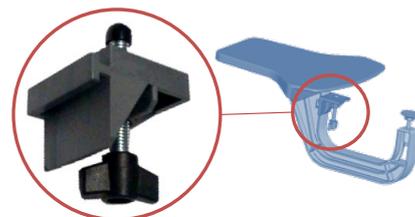

Bloqueo opcional: insertar el tornillo de bloqueo en el alojamiento previsto en el brazo y apretarlo contra el tablero de la mesa.